

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VẬT LIỆU CÂY GHÉP LÂU DÀI VÀO CƠ THỂ - GIÁ ĐỖ NỘI MẠCH

Chủng loại: (ABRAX; LEADER PLUS; PHOENIX PICO)

Thiết bị này được khử trùng bằng khí Ethylen oxiden. Thiết bị là sản phẩm sử dụng 1 lần. Không sử dụng nếu bao bì bị mở hoặc có hư hại.

1. Bảo quản.

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời.

2. Hướng dẫn sử lý:

Sau khi sử dụng xử lý sản phẩm và bao bì theo quy trình chuẩn của bệnh viện hoặc theo tiêu chuẩn/ chính sách của nhà nước.

3. Hướng dẫn phẫu thuật:


3.1. Kiểm tra trước khi sử dụng

- Cần thận kiểm tra bao bì đóng gói trước khi mở.
- Không sử dụng sản phẩm quá hạn sử dụng. Nếu bề ngoài sản phẩm bị hư hại (móp, ẩm ướt, phồng...) hoặc quá hạn sử dụng thì liên hệ nhà phân phối để gửi trả lại hàng.
- Không sử dụng nếu thấy có bất cứ tổn hại nào.

Lưu ý: Nếu trong quá trình sử dụng stent mà stent bị uốn cong hoặc bị xoắn thì không sử dụng sản phẩm.

3.2. Chuẩn bị.

- Bệnh nhân
 - Đánh giá bệnh nhân, các xét nghiệm
 - Kiểm tra giấy cam kết
- Trang thiết bị
 - Mang mask, mũ
 - Đường truyền tĩnh mạch
 - Gắn monitor ECG, HA, oxymeter
 - Mang áo chì
 - Kiểm tra đường áp lực
- Các bước thực hiện.
 - Sát trùng da
 - Gây tê
 - Chọn mạch máu (thường là mạch vành từ bẹn hoặc mạch) , đặt sheath
 - Đưa ống dẫn đường (guiding catheter) luồn qua Sheath đặt ở lỗ xuất phát động mạch vành. Luồn guiding catheter tới lòng ngực.
 - Luồn dây guidewire theo guiding catheter, luồn dây guidewire tới vị trí tổn thương, luồn dây guidewire quá vị trí bị tổn thương một chút.
 - Đưa stent theo guidewire đến sang thương
 - Nong stent tới áp lực đề xuất hoặc cao hơn
 - Rút bóng
 - Thành công:

 Hết sang thương, tỉ lệ 1: 1

- ✚ Không mất nhánh bên
- ✚ Không bóc tách (dissection)
- ✚ Dòng chảy tốt

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2019

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA



NGUYỄN LÊ QUANG VŨ